

PRODUCT CATALOGUE

ICSI Medium

- Ready to Useの ICSI 使用時に適用した培地です。
- インキュベーター外での配偶子のハンドリングとマニュピレーション操作に ご使用ください。



10_mL

REF	コード	内容量
93470	ICM-10	10mL×2

成分

Amino acids / Calcium chloride / Gentamicin / Glucose / HEPES / Human serum albumin / Magnesium sulfate / Potassium chloride / Potassium phosphate / Sodium bicarbonate / Sodium chloride / Sodium lactate / Sodium pyruvate

品質管理

pH 7.2-7.6 / 浸透圧 270-295mOsm/L / エンドトキシン <0.25EU/mL / 無菌試験 / Mouse Embryo Assay ≥80%

冷蔵保存 2~8℃

有効期限 製造日より12ヶ月

改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

株式会社北里コーポレーション

: 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10 東京オフィス:〒105-0012東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL https://www.kitazato.co.jp/ Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

FAXでのご注文先

PROTOCOL プロトコール


※ PVPを使用されない場合はICSI Mediumで代替頂けます。

01 ICSIディッシュを作製し、精子懸濁液をPVP1 ドロップの上部に添加します(右図)。

02 ICSI Medium に卵子を移します。

03 形態良好な運動精子をPVP①ドロップの下部から選別し、 PVP②ドロップに移し不動化処理をします。

04 ICSI操作に移ります。

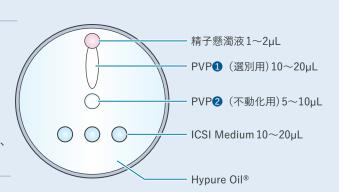

※上記のプロトコールは一例です。

RELATED PRODUCTS 関連製品

Light Heavy





Hypure Oil®

REF	コード	内容量	
93521	MOLH-100	100 m L	
93621	MOHV-100	100mL	



PVP

REF	コード	製品仕様	内容量			
94310	PVP10-05 x 5	PVP 10%	0.5mL x5			
94311	PVP7-05 x 5	PVP 7%	0.5mLx5			
94312	PVP5-05 x 5	PVP 5%	0.5 m L x 5			
94313	PVP3-05 x 5	PVP 3%	0.5mLx5			




ICSI Injection Pipettes

REF	コード	内径(μm)	外径(μm)	アーム長(μm)	内容量
71000	MT-INJ30	4	6	1000	10pcs / 箱



PIEZO-ICSI Injection Pipettes

REF	コード	ベント角	内径(μm)	外径(μm)	内容量
71088	MT-PIEZO20	20	4	6	10pcs / 箱
71089	MT-PIEZO25	25	4	6	10pcs / 箱

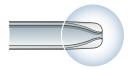

Holding Pipettes

Troiding Tipettes							
REF	コード	内径(μm)	外径(μm)	内容量			
71100	MT-HD30	15	100	10pcs / 箱			
71103	MT-HDMH30	20	100	10pcs / 箱			
71110	MT-HDLH30	30	120	10pcs / 箱			

