

## PRODUCT CATALOGUE

## SPC-50

- 院内採精用の滅菌済み精液採取容器です。
- 採精しやすい広口構造の容器です。
- コニカルな形状で精液が溜まり易く、0.5mLから目盛が記載されているため精液量が少なくても回収が可能です。
- 容器重量は30g(フタなし)で、精液量を重さからも測定ができます。
- 貯液管の周囲が空気層のため、外気の影響を受けにくい形状になっています。




REF	コード	製品説明	内量
1507000	SPC-50	精液専用容器（院内用）	50個 / 箱（個包装）

## 製品仕様

外径寸法：φ52×80mm  
容量：最大容量25mL（メモリ箇所10mL）  
材質：ポリプロピレン  
個別包装

## 品質管理

滅菌済み

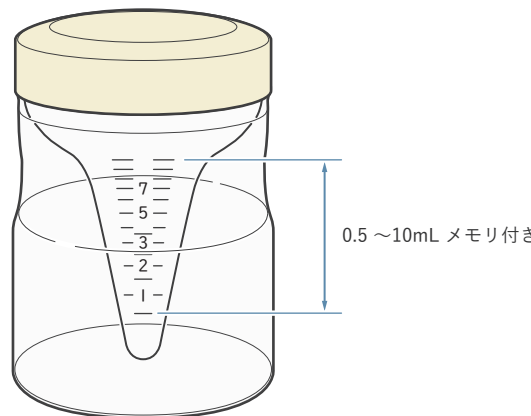

容器重量 30g（フタあり35g）

改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

## 株式会社北里コーポレーション

本社：〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10  
東京オフィス：〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail [info@kitazato.co.jp](mailto:info@kitazato.co.jp)

お電話でのお問い合わせ

☎ 0120-457-454

FAXでのご注文先

📠 0120-111-471


## PRECAUTIONS FOR USE 使用上の注意事項

### 採精前

- 本品は滅菌済みの容器です。雑菌の侵入を防ぐために蓋の内側と本体内部には触れないようにしてください。
- SPC-50の本体又は蓋の表面に、患者様認証情報を記載、貼り付けしてください。

### 採精

- 採精が終了したら速やかに蓋を閉めていただくよう、ご説明ください。

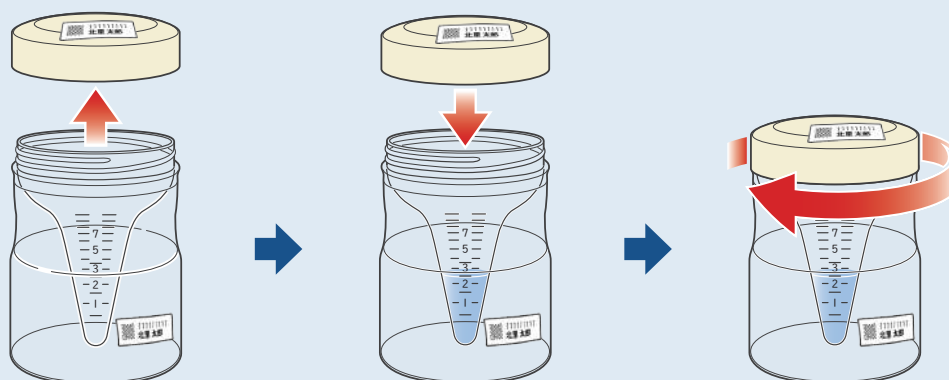

### 採精後

- 密閉性の高い容器ですが、上下逆向きにしないよう注意して下さい。
- 液量は貯液管の目盛 (0.5mL単位) でも行えますが、ピペットを用いると、より正確に計量できます。  
(蓋なし:30g、蓋あり35g / 重量から測定することも可能です)
- 輸送する際は短時間で、体温程度に温度保持することを心掛けて下さい。

## RELATED PRODUCTS 関連製品



**transporter S TPS**  
REF : 65028



**Spermコンティナー**  
REF : 65003、65002、65001、  
65006、65005、65004



**sp-ace T**  
REF : 65015



**sp-ace P**  
REF : 65016



**Sperm-TN64**  
REF : 65010



**マクラー精子カウントチャンバー**  
REF : 2000000、2000001