


トランスポーターSの使用方法


医療機関様向け

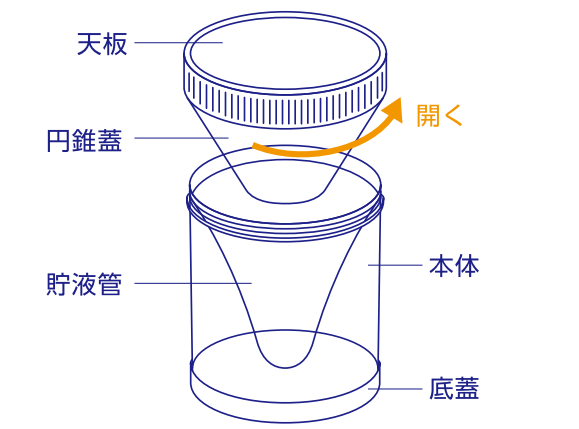

1 本体から円錐蓋を外す


- 円錐蓋を左側に回して本体から外します(天板は外さないでください)
- 外した円錐蓋は装着時と逆向きで平らなところに置きます。

〈注意事項〉
容器は滅菌されています。雑菌の侵入を防ぐため円錐蓋と本体の内側部分には触れないようにしてください。

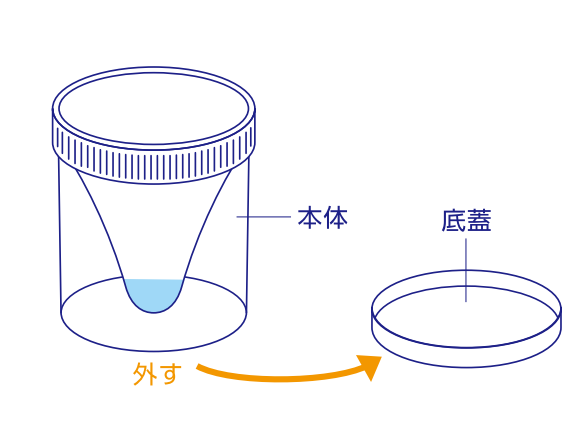


4 回収の準備

- 射出精液は本体の下部から回収するように設計されています。
- 円錐蓋は閉じたまま、本体下部の底蓋を外します。
- 回収専用のシリンジをご用意ください。

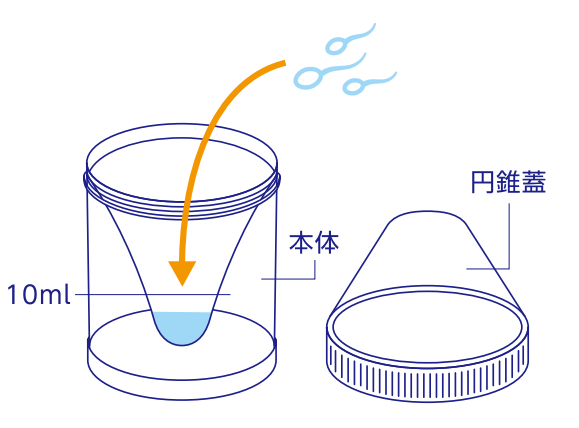


2 本体に採精する

- 本体中央の貯液管部分を目印に採精します。
- 液体がすべて収納されたら速やかに円錐蓋を右側に回し、しっかり締めます。(本体から底蓋を外さないでください)

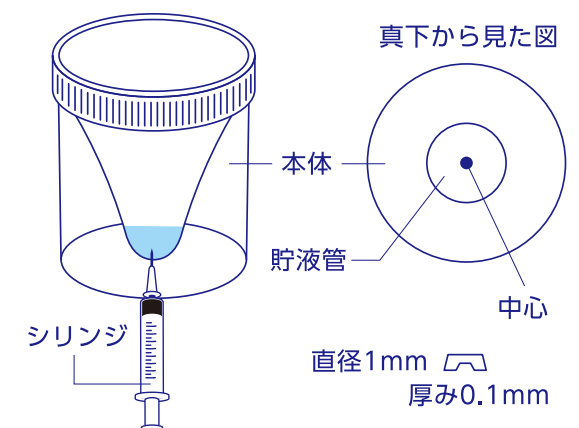


5 射出精液の回収

- 本体を下から見ると貯液管の真ん中に小さな凹み(直径1mm、厚さ0.1mm)があります。
- 凹みにシリンジのカヌラを差し込み、射出精液を回収します。

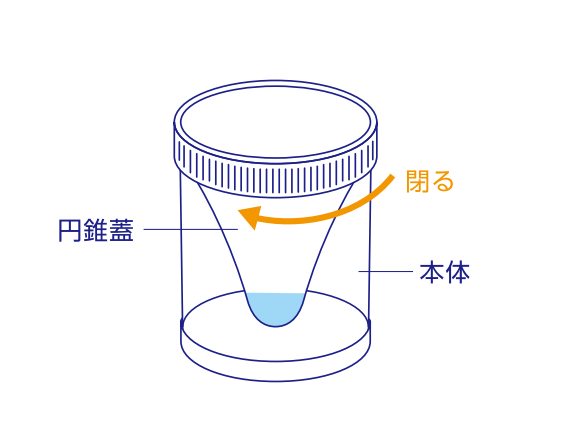

3 保存・輸送する

- 容器は直射日光を避けて保存・輸送してください。
- 液体を空気に触れさせないために円錐蓋は開けないようにしてください。
- 容器は高い密閉性がありますが、上下逆向きにしないようにしてください。
- 自宅から医療機関への輸送は常温でできるだけ短時間で行いましょう。

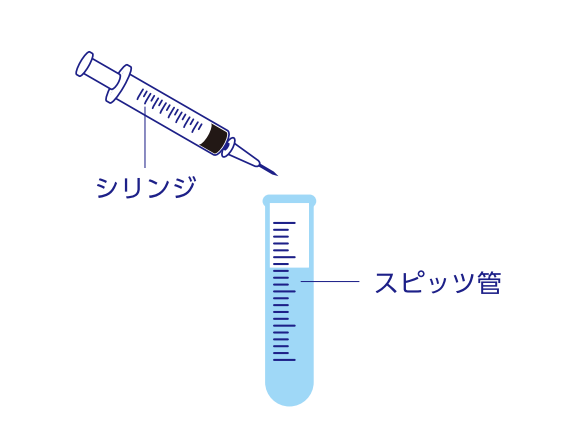

6 使用

- 目的に応じてご使用ください。